


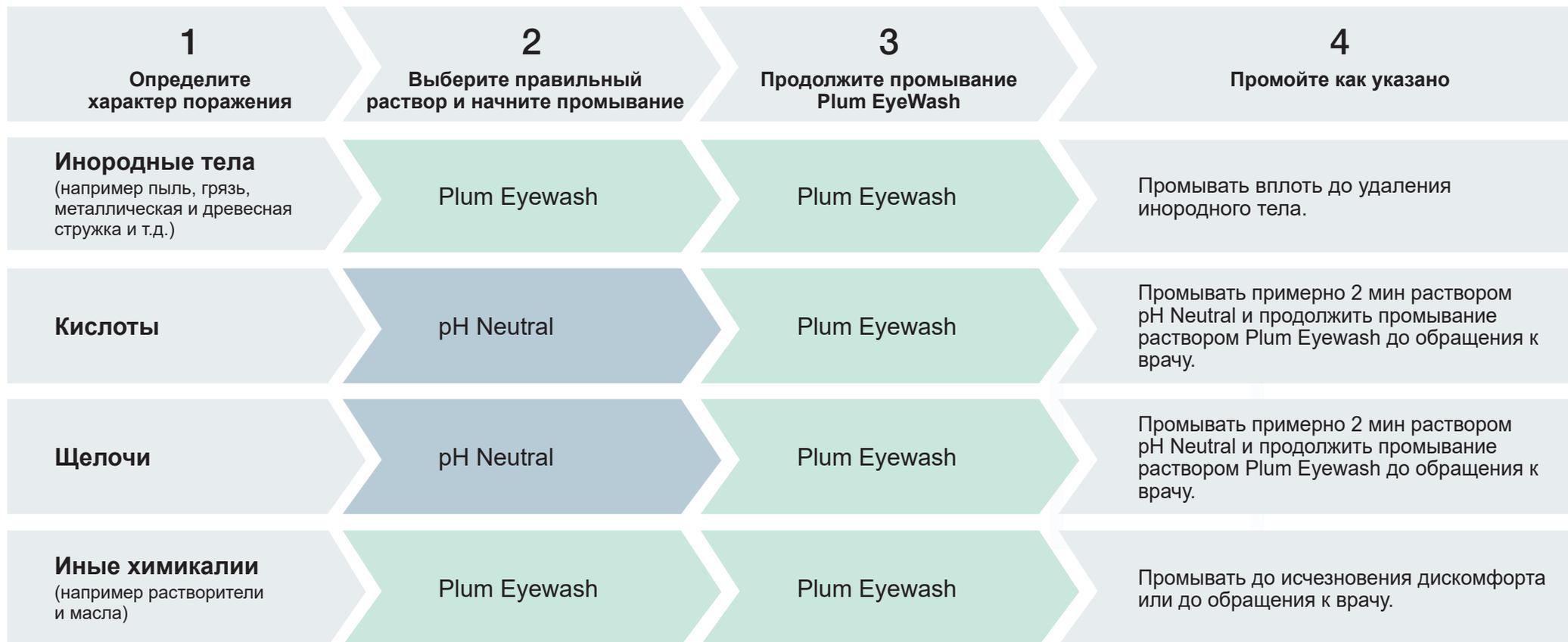

# ПЛАН ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



pH Neutral



Plum Eyewash



При несчастном случае с глазами можно легко воспользоваться Plum Eyewash



Поверните насадку в направлении, указанном стрелкой до нарушения герметичности флакона



Запрокиньте голову, нажмите на флакон и начните промывание



Глаз можно также промыть наклонив голову вниз, мягко нажав на флакон

## ВАЖНО!

Жидкость должна попадать в глаз мягкой струей без напора. Слегка нажимайте на флакон, не сдавливая его. Мы рекомендуем всегда обращаться к врачу при любых типах травм глаз. Имейте всегда под рукой дополнительный флакон, для того, чтобы продолжить промывание по пути к врачу. Этот план первой помощи можно заказать у Plum.